

Remove Soft / Medium / Plus. Remoción atraumática de lesiones cariosas. Fabricado por **MILFARMA RA S.A.S.** – Av. BELGRANO 1217 OF 41-44, CABA-Argentina. Director técnico: Farm. Sergio A. Benítez, MN 11588. **Autorizado por la ANMAT PM-2862-8.** Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

Contenido | Composición

Producto médico compuesto por 2 componentes que se mezclan A:B en relación 1:1 / 1:2 / 2:1 según criterio profesional en el momento de su aplicación.

(A)

Activador

- Soft: 0,1 M ClONa
- Medium: 0,2 M ClONa
- Plus: 0,5 M ClONa
- Excipientes c.s.p. 100 ml

(B)

Regulador

- Glutamina 0,2 M
- Colorante FDyC Azul número 2 0,005g
- Excipientes c.s.p. 100 ml

Modo de Uso

El producto se presenta separado en 2 componentes, tiene consistencia de gel lo que facilita su manejo, y deben mezclarse al momento del uso para lograr su activación, dado que una vez activado no es estable, debe **aplicarse dentro de los 30 minutos de realizada la mezcla.**

Una vez aplicado sobre el tejido carioso, se aguarda la acción del mismo (**tiempo de contacto recomendado 30 segundos**) y luego comience la remoción con elemento manual (cuchara dentinaria o excavador) con leves movimientos de raspaje hasta remover el tejido reblandecido. El producto contiene colorante alimenticio que cumple la función de marcador y revelador de tejido necrótico por fluorescencia a través de luz halógena. El profesional puede corroborar la acción del producto observando el marcado de color verde fluorescente. En caso de remanente de tejido necrótico y requerir una nueva aplicación puede realizarla repitiendo los pasos anteriores.

Una vez finalizada la remoción limpie la cavidad con un algodón humedecido en agua o lave con jeringa para permitir que el material de obturación se adhiera adecuadamente.

Los componentes están contenidos en Jeringas de 3 ml o muestras de 1 ml (0,5 ml en cada jeringa), lo que permite medir la cantidad a usar de cada uno de ellos. La jeringa es multiuso, pero la combinación debe utilizarse en el momento y descartar sobrantes.

Precauciones, restricciones, advertencias, cuidados especiales y aclaraciones sobre el uso del producto médico, como su almacenamiento y transporte: conservar en lugar fresco y oscuro.

ADVERTENCIA: el componente activador en su estado puro puede dañar las mucosas (y encías) por lo que debe asegurarse que no se aplique puro. Siempre aplicar la mezcla de los 2 componentes en el diente. Realizar la mezcla de ambos componentes sobre un portaobjeto o superficie similar en la mesa operatoria, fuera del campo quirúrgico, en las proporciones recomendadas. Al aplicar **realizar aislamiento de la pieza a tratar utilizando rollos de algodón y succión.**